


Definisse™ Filler

**RÉVÉLER  
LA BEAUTÉ  
DE L'INSTANT**

EMPLACEMENT  
CARTE DE VISITE

# SERINGUE HAUTE QUALITÉ

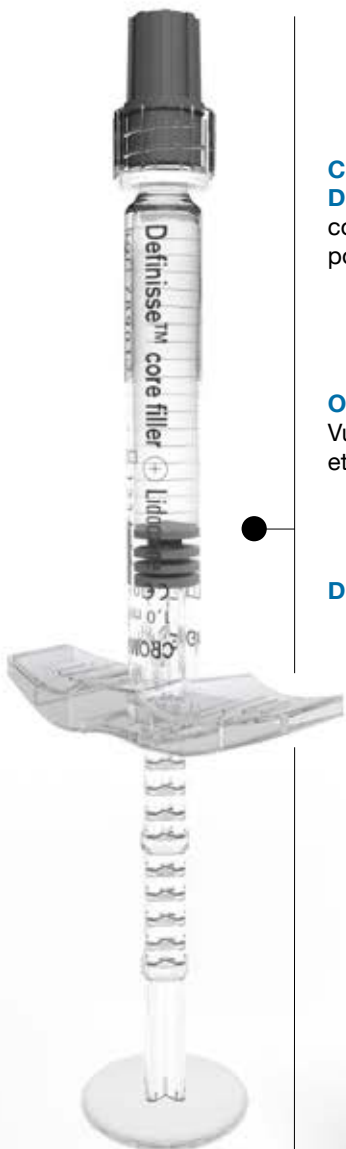

**CONFORT  
DE PRISE EN MAIN**  
composants solides  
pour un travail routinier

**ORIENTATION VISUELLE**  
Vue d'ensemble simple  
et rapide

**DESIGN INNOVANT**

## PRÉHENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Surface de préhension  
supplémentaire à la butée  
et sur la tige du piston  
pour une meilleure  
préhension

EMPLACEMENT  
CARTE DE VISITE

# GAMME Definisse™ Filler

## Definisse™ touch filler + Lidocaine



Correction des rides modérées à profondes  
et augmentation du volume des lèvres<sup>5</sup>

## Definisse™ restore filler + Lidocaine



Correction des rides profondes, restauration  
des volumes et redéfinition des contours<sup>5</sup>


## Definisse™ core filler + Lidocaine



Restauration et création de volumes profonds  
et redéfinition des contours<sup>5</sup>



## RELIFE™, L'APPROCHE HOLISTIQUE EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE

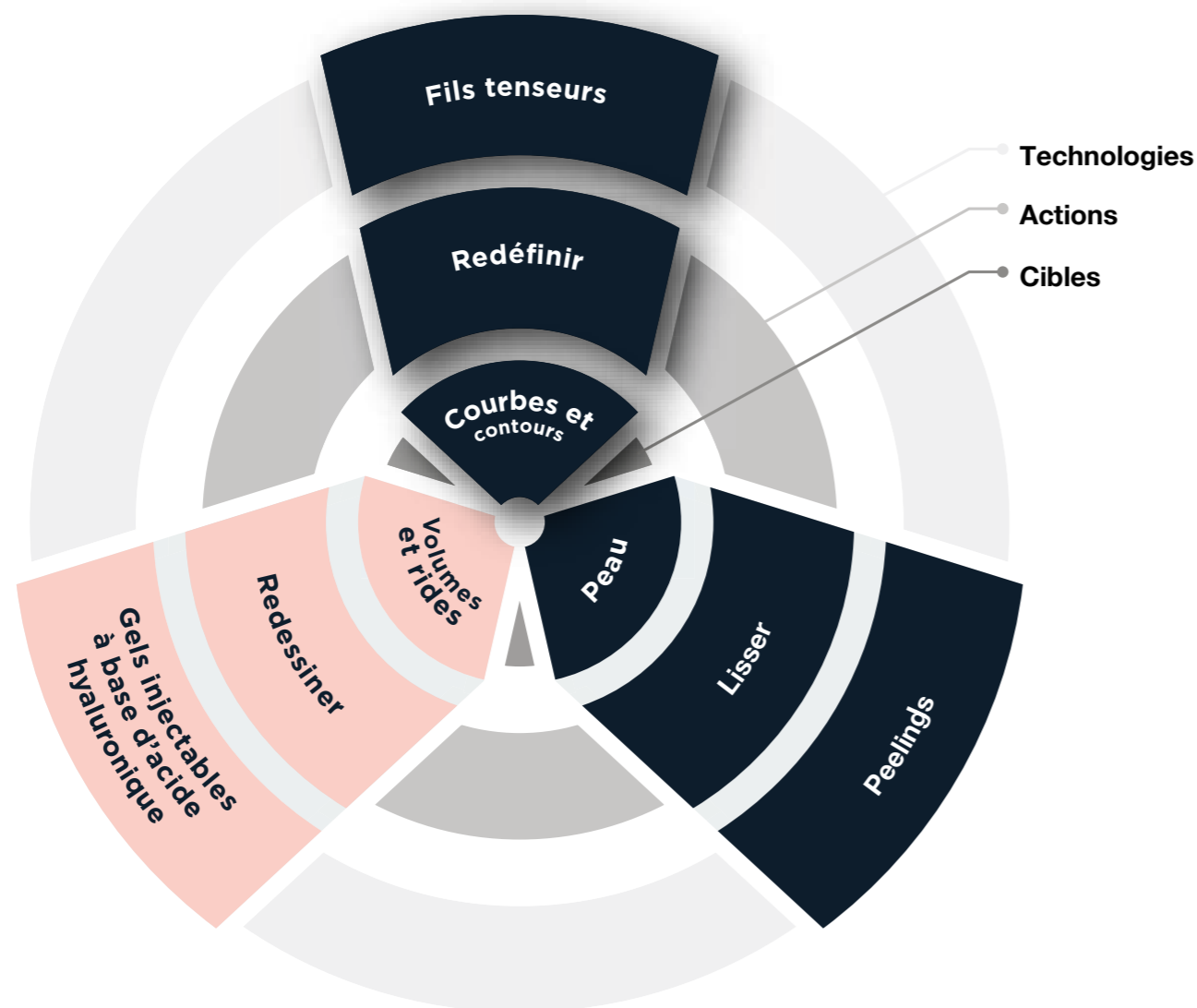

L'approche holistique de la médecine esthétique adoptée par RELIFE™ répond aux besoins quotidiens des praticiens et propose des outils et des techniques efficaces qui permettent d'atteindre des objectifs esthétiques en réponse aux attentes patients.

## RÉPONDRE AUX BESOINS ET ATTENTES DES PATIENTS =

### Quelles sont les attentes des patients ?<sup>1,2</sup>

- Des résultats naturels
- Des résultats esthétiques discrets
- Un visage expressif qui transmet leurs émotions

### Quelles sont vos besoins ?<sup>1,2</sup>

- Un produit « safe » et bien toléré
- Des résultats durables
- Des résultats naturels et reproductibles
- Une facilité d'extrusion

## DES PATIENTS EN RECHERCHE DE RÉSULTATS NATURELS ET DES PRATICIENS EN ATTENTE DE STANDARDS ÉLEVÉS



RELIFE™, du groupe MENARINI, met au service de ses produits et de ses clients, son expertise scientifique et médicale.

## MENARINI, DANS LE MONDE =

- 1<sup>er</sup> groupe pharmaceutique Italien
- Fondé en 1886
- Présent dans 136 pays

## CHOISIR UN BON PRODUIT DE COMPLEMENT

- Propriétés rhéologiques adaptées
- Résultats esthétiques naturels et durables



La technologie XTR\* une technologie de réticulation unique et contrôlée en 3 étapes³...

1

### PRÉ-TRAITEMENT³

Fragmentation contrôlée des longues chaînes d'acide hyaluronique (AH) pour obtenir deux types d'HA de différents poids moléculaires :

- > Poids moléculaire moyen :  $2.5 \times 10^6 - 3.2 \times 10^6$  Dalton
- > Haut poids moléculaire :  $3.2 \times 10^6 - 3.5 \times 10^6$  Dalton

### RÉTICULATION³

Obtention d'une matrice d'HA 3D stable :

- > Faible force d'extrusion et injection contrôlée
- + Effet volumateur durable

2

3

### PURIFICATION³

Un processus de purification très efficace réduit la quantité de BDDE\*\* résiduelle :

- > Produit plus sûr avec moins de risques d'effets indésirables après le traitement

...Pour des résultats naturels, durables et immédiats pour vos patients³

\* eXcellent Three-dimensional Reticulation \*\* 1,4-Butanediol diglycidyl ether

## CARACTÉRISTIQUES RHÉOLOGIQUES DE Definisse™ Filler³, 4

• Definisse™ touch filler + Lidocaine (XTR™ Technology)	153,58	26,67	0,174
• Teosyal® RHA 1	53,84	21,13	0,392
• Belotero® Balance	49,90	24,45	0,490
• Juvederm® Volbella	206,73	24,08	0,116
• Definisse™ restore filler + Lidocaine (XTR™ Technology)	292,37	27,86	0,095
• Teosyal® RHA 3	164,37	30,53	0,186
• Belotero® Intense	136,41	42,82	0,313
• Juvederm® Volift	265,65	27,44	0,103
• Definisse™ core filler + Lidocaine (XTR™ Technology)	426,76	26,87	0,063
• Teosyal® RHA 4	293,46	34,93	0,119
• Belotero® Volume	233,50	45,24	0,193
• Juvederm® Voluma	329,85	22,99	0,067

\* G' correspond au module élastique du gel injectable | \*\* G'' correspond au module visqueux du gel injectable | \*\*\* Tan δ correspond au ratio de G'' sur G'

Les gels injectables Definisse™ possèdent les caractéristiques des gels injectables de nouvelle génération qui leur confèrent des indications distinctes d'un produit à l'autre⁴ :

- **Definisse™ touch filler + Lidocaine** : profil élastique qui lui confère la caractéristique d'un filler à injecter plus superficiellement que les deux autres produits de la gamme
- **Definisse™ restore filler + Lidocaine** et **Definisse™ core filler + Lidocaine** : caractéristiques similaires et module élastique (G') élevé = injection en profondeur pour le support des tissus = filler volumateurs avec une projection excellente même pour de petites quantités injectées

Le traitement par produit de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée.

## Definisse™ PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME

### Definisse™ touch filler + Lidocaïne

Correction des rides modérées à profondes et augmentation du volume des lèvres<sup>5</sup>

Concentration en AH	23 mg/ml
Concentration en lidocaïne	0,3 %
Technologie de réticulation	XTR™ Technology
Taux de réticulation	● ○ ○
Profondeur d'injection	Derme moyen à profond
Aiguilles fournies	2 x 27G 1/2"
Packaging	1x1 ml



### Definisse™ restore filler + Lidocaïne

Correction des rides profondes, restauration des volumes et redéfinition des contours<sup>5</sup>


Concentration en AH	23 mg/ml
Concentration en lidocaïne	0,3 %
Technologie de réticulation	XTR™ Technology
Taux de réticulation	● ● ○
Profondeur d'injection	Derme profond ou sous-cutané
Aiguilles fournies	2 x 27G 1/2"
Packaging	1x1 ml



### Definisse™ Core filler + Lidocaïne

Restauration et création de volumes profonds et redéfinition des contours<sup>5</sup>

Concentration en AH	25 mg/ml
Concentration en lidocaïne	0,3 %
Technologie de réticulation	XTR™ Technology
Taux de réticulation	● ● ●
Profondeur d'injection	Derme profond, sous-cutané ou supra-périosté
Aiguilles fournies	2 x 27G 1/2"
Packaging	1x1 ml

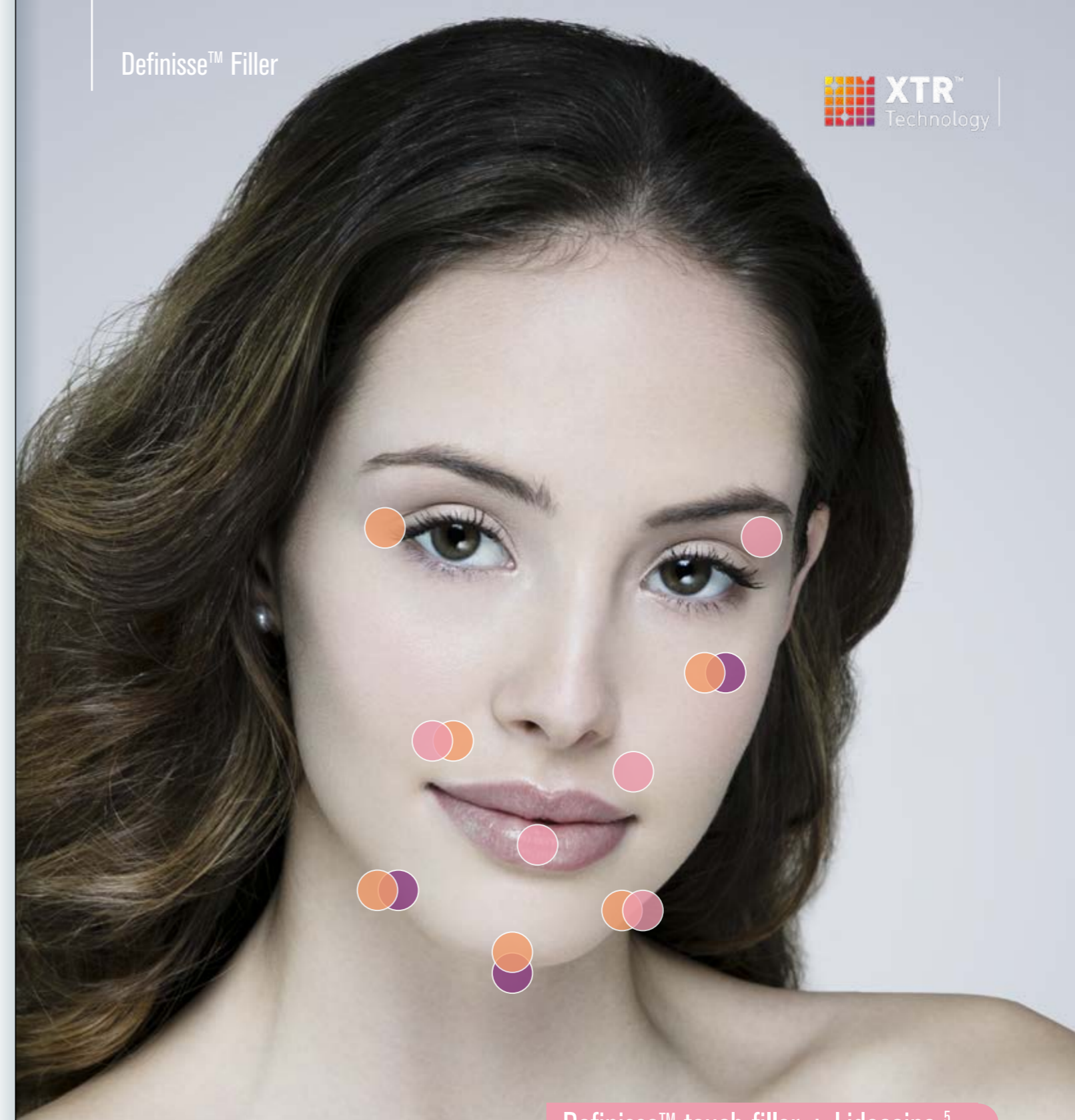

Definisse™ touch filler + Lidocaïne<sup>5</sup>

Definisse™ restore filler + Lidocaïne<sup>5</sup>

Definisse™ core filler + Lidocaïne<sup>5</sup>

## Definisse™ Filler

Révéler la beauté de l'instant

## QUELQUES PLANS DE TRAITEMENT AVEC LES PRODUITS Definisse™ Filler...

### Techniques AIGUILLE

### Zone d'injection

	Zone sûre	Zone complexe	Zone à risque
<b>Bolus</b>			
<b>Papules intradermiques</b>			
<b>Canules*</b>			

\*Le sommet du triangle indique la direction d'insertion de l'aiguille / de la canule

Indications	Guide	Produit	Profondeur d'injection	Outil	Volume
<b>LÈVRE ROUGE</b>		<b>Definisse™ touch + Lidocaïne</b>	Muqueuse labiale	Aiguille de 27/30"G	0,03 à 0,05 ml par point d'injection

#### À savoir :


- La recommandation sur l'indication, le type d'aiguille, le type de produit, les couches et les volumes injectés, est basée sur la recommandation du Docteur Giovanni Salti, Chirurgien Plasticien à Florence.
- Les produits Definisse™ Filler + Lidocaïne sont livrés avec une aiguille de 27"G à l'intérieur de la boîte


Indications	Guide	Produit	Profondeur d'injection	Outil	Volume
<b>GLABELLE</b>		<b>Definisse™ touch + Lidocaïne</b>	Intra-dermique	Aiguille de 30"G	0,01 ml par point d'injection

Indications	Guide	Produit	Profondeur d'injection	Outil	Volume
<b>PLIS D'AMERTUME / RIDES DE LA MARIONNETTE</b>		<b>Definisse™ restore + Lidocaïne</b>	Sous-cutané	Aiguille de 30/27"G	0,1 à 0,5 ml par côté et par zone (en éventail)

#### À savoir :

- La recommandation sur l'indication, le type d'aiguille, le type de produit, les couches et les volumes injectés, est basée sur la recommandation du Docteur Giovanni Salti, Chirurgien Plasticien à Florence.
- Les produits Definisse™ Filler + Lidocaïne sont livrés avec une aiguille de 27"G à l'intérieur de la boîte

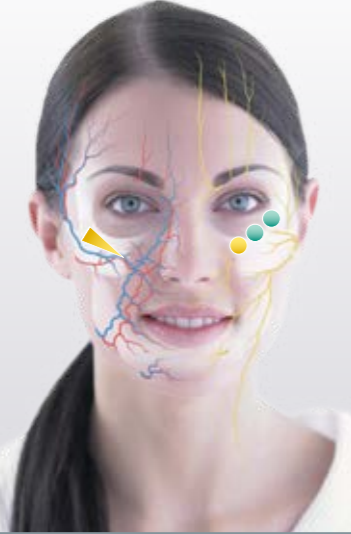Indications	Guide	Produit	Profondeur d'injection	Outil	Volume
ARC ZYGOMATIQUE		Definisse™ core + Lidocaine	Supra-périosté	Aiguille de 27"G	0,1 à 0,2 ml par point d'injection


Indications	Guide	Produit	Profondeur d'injection	Outil	Volume
MENTON		Definisse™ core + Lidocaine	Supra-périosté	Aiguille de 27"G	0,1 à 0,3 ml par point d'injection



Vous souhaitez avoir plus d'informations sur les plans de traitements et techniques avec Definisse™ Filler ?  
Rendez-vous sur notre plateforme de formation  
[www.relief-icme.com](http://www.relief-icme.com)

À savoir :  
• La recommandation sur l'indication, le type d'aiguille, le type de produit, les couches et les volumes injectés, est basée sur la recommandation du Docteur Giovanni Salti, Chirurgien Plasticien à Florence.  
• Les produits Definisse™ Filler + Lidocaine sont livrés avec une aiguille de 27"G à l'intérieur de la boîte

## Definisse™ Filler = UNE SERINGUE « HAUTE QUALITÉ »

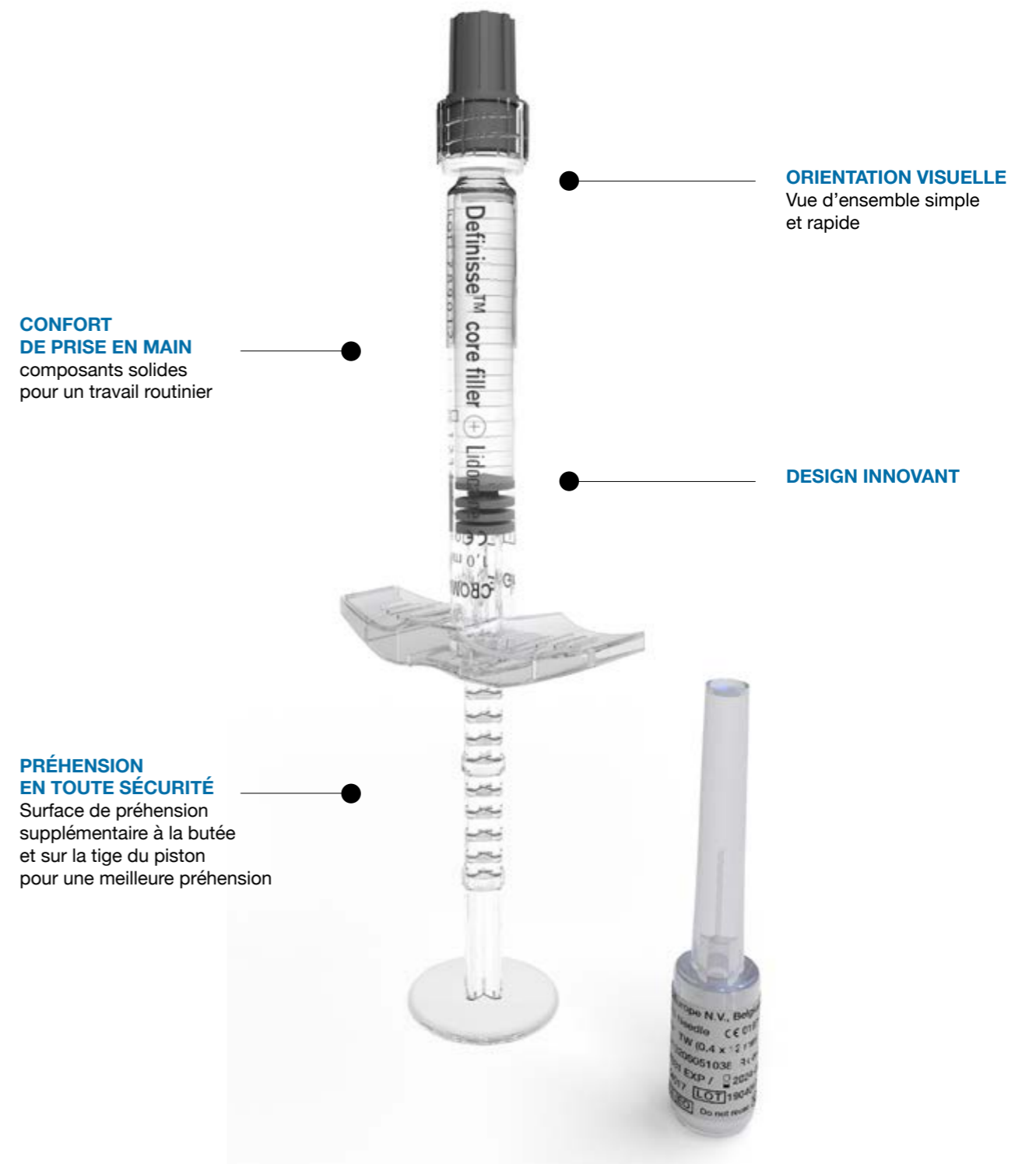

**ENFIN, LE PINCEAU « HAUTE TECHNOLOGIE »  
POUR REDESSINER VOTRE ART.**

## Références

1. Michaud T *et al.* Facial dynamics and emotional expressions in facial aging treatments. Journal of Cosmetic Dermatology. 2014;1-13
2. Breithaupt AD *et al.* Next-generation dermal filler and volumizers. Cosmet Dermatol 2012; 25 : 184-19
3. Salti G. XTR technology and Rheology. Prime Journal. 2020;85
4. Rigano Laboratories srl. Determination of the viscoelastic properties of HA filler. Prot 192/12.
5. Notices d'utilisation de Definisse™ touch filler + Lidocaïne, Definisse™ restore filler + Lidocaïne et Definisse™ core filler + Lidocaïne

Les produits Definisse™ core filler + Lidocaïne, Definisse™ restore filler + Lidocaïne et Definisse™ touch filler + Lidocaïne. sont des dispositifs médicaux de classe III, qui sont des produits de santé, et portent au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123.

Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice de santé.

Un traitement par produit de comblement, peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée.

**Accéder aux mentions légales  
en scannant le QR code ci-joint**



### Rajouter de la vie aux années

RELIFE France  
Immeuble MENARINI, 1 rue du Jura,  
94633 Rungis, France

CE 0123. CROMA-PHARMA GmbH.  
Industriezelle 6,  
2100 Leobendorf, Austria

[relifecompany.fr](http://relifecompany.fr)

Matériel destiné exclusivement aux professionnels de santé

Retrouvez-nous sur



## Definisse™ Filler

**RÉVÉLER  
LA BEAUTÉ  
DE L'INSTANT**

FR1RELO3009/20-Document établi en Mai 2020 - 20/06/RELIFE/PM/007-FR20029

